

# 腸内フローラ検査用大便採取説明書（スプーン型）


☆キット内容を確認してください。

採取容器（液体入り）	1本
採使用シート	1枚（含まれない場合もあります） （採便後トイレにそのまま流せます）
今お読み頂いている説明書	1枚

## 便の取り方

（採使用シートを使用しない場合、③からお進みください）

- ①-1 採使用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。  
-2 採使用シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。
- ② 採使用シート上に排便してください。
- ③-1 チューブ内の液がもれないよう採取容器のさじを下にお持ちください。  
-2 茶色の蓋の部分を中心に回しながら、上に引き出します。  
-3 溶液をこぼさないようご注意ください。

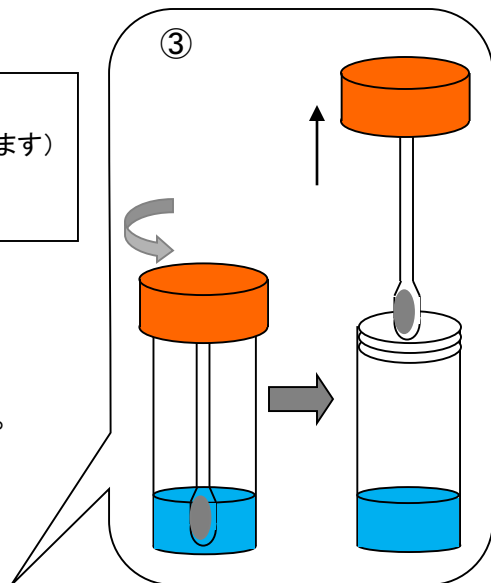

☆ご注意 !!


採便容器内の液体(グアニジン溶液)は誤って触れた場合、瞬時に害を与えるものではありませんが、速やかに水洗してください。また子供さんが誤飲されないよう、ご注意ください。

- ④ **さじ部分にのみ便がつく程度に**  
場所を変えながら数ヶ所すくい取ってください。


☆ご注意 !!

（何回か突き刺した便の量は小豆粒1つ程度で十分です）  
（余分に便を取り過ぎて容器周りに付かないようご注意ください）

- ⑤-1 さじ部分を元の液チューブに戻してください。  
-2 茶色の蓋を回らなくなるまで硬く締めて、きちんと密封されたことを確認してください。  
-3 容器を5～6回振って中身を混ぜます。

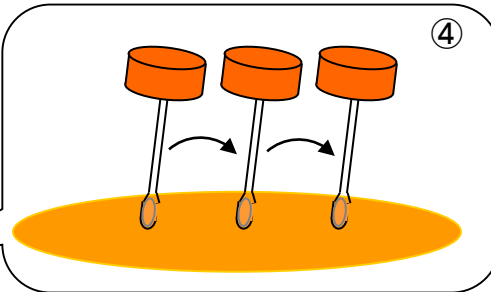

採取量の目安

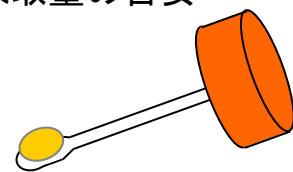

↑ 小豆粒程度

- ⑥ 採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて提出日まで、室温で保存してください。

