

腸内フローラ検査用大便採取説明書（ブラシタイプ）

☆キット内容を確認してください。

採取容器（液体入リスポイト）	1本
採使用シート （排便後トイレにそのまま流せます）	1枚（含まれない場合もあります）
今お読み頂いている説明書	1枚

便の取り方（採使用シートを使用しない場合、③からお進みください）

☆ご注意 !!

必ず、排尿を済ませてから次の作業に取り掛かってください。

- ①-1 採使用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。
- 2 採使用シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。

② 採使用シート上に排便してください。

- ③-1 チューブ内の液がもれないよう採取容器の細い方を下にお持ちください。
- 2 ピンクの柄の部分を中心に回しながら、上に引き出します。

☆ご注意 !!

採便管内の液体（グアニジン溶液）は誤って触れた場合、瞬時に害を与えるものではありませんが、速やかに水洗してください。

- ④ **ブラシ部分にのみ便がつく程度に**
場所を変えながら数ヶ所に突き刺してください。

☆ご注意 !!

（何回か突き刺した便の量は米粒1つ程度で十分です）
（余分に便を取り過ぎて容器周りに付かないようご注意ください）

- ⑤-1 ブラシ部分を元の液チューブに戻してください。
- 2 回すように締めて、きちんと密閉されたことを確認してください。
- 3 容器を5～6回振って中身を混ぜます。

- ⑥ 採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて提出日まで、室温で保存してください。

