


取扱説明書 「らくりゅう 楽流カップ WIDE」

STEP 1 準備

裏面にある両面テープの剥離紙を剥がしてください。

※剥離紙はトイレに流せません。

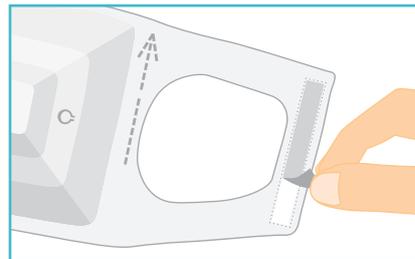


STEP 2 設置

便座または便器の奥側に採便シートを貼りつけます。


設置方向

※便座カバーを使用されている場合は便器に貼りつけてください。

※設置してから形を整えてください。

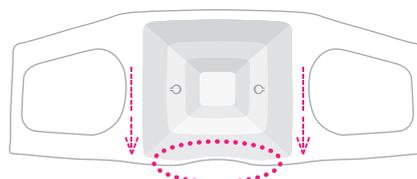

矢印と切欠き側が手前

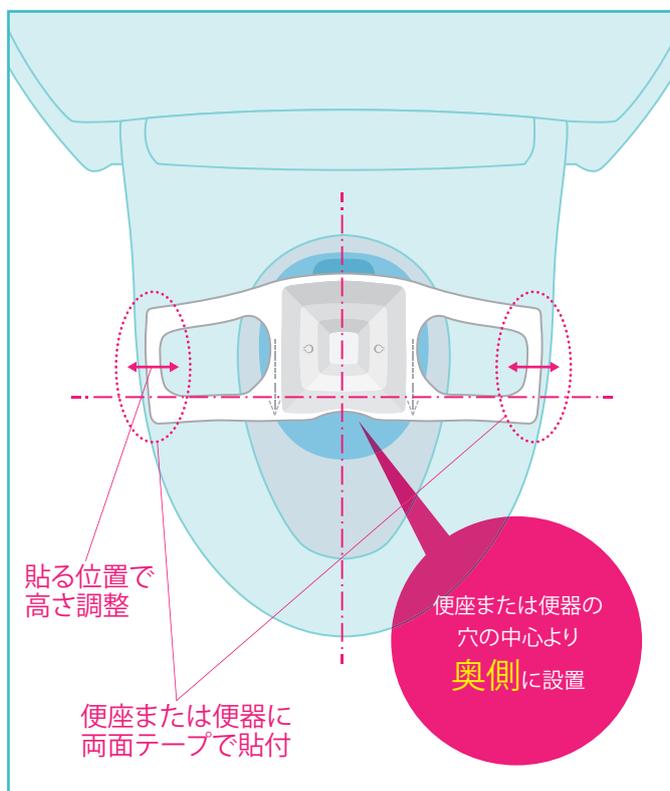


貼る位置で
高さ調整

便座または便器に
両面テープで貼付

便座または便器の
穴の中心より
奥側に設置


設置イメージ

便座または便器の
穴の中心より
奥側に設置

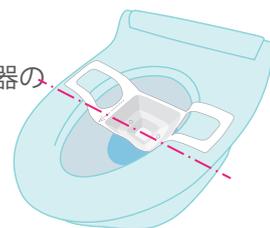

設置高さの目安

貼り付けた位置から溜まり水までの
距離の中間くらい

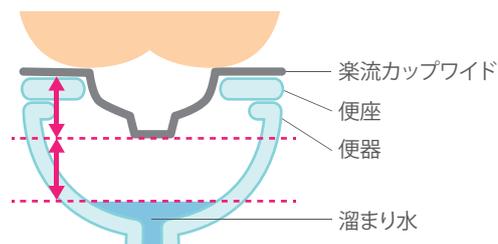

STEP 3 採便・処分

用便後、便を採取します。その後、両面テープが残らないよう便座または便器からゆっくり剥がし、そのままトイレに流してください。

※採便シートを剥がす際、急に剥がすと採便シートの破れや糊残りの原因になります。

