

腸内フローラ・代謝物検査用 採便キット

メタボロキーパー説明書








ご注意



- 液体が誤って皮膚に付いたり目や口に入った場合は、水で十分に洗い流してください。瞬時に害を与えるものではありません。刺激が残る場合、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管し、お子様が誤飲されないようにご注意ください。

○ キット内容を確認してください。

- | | |
|----------------------|----|
| a) スプーン | 1本 |
| b) 採便容器 | 1本 |
| c) キャップ (液体入り) | 1個 |
| d) 便すり切り棒 (紙製) | 1本 |
| ・採便シート *付属しない場合もあります | 1枚 |
| ・説明書 | |

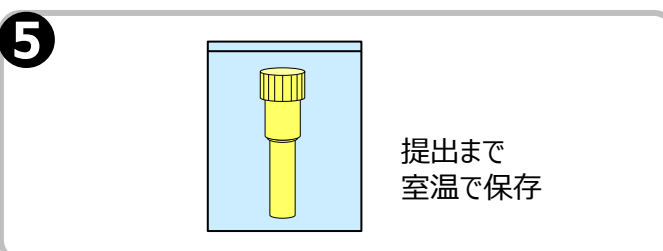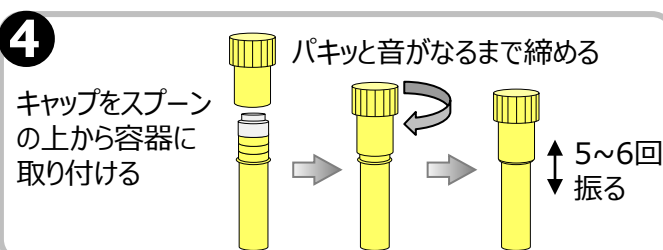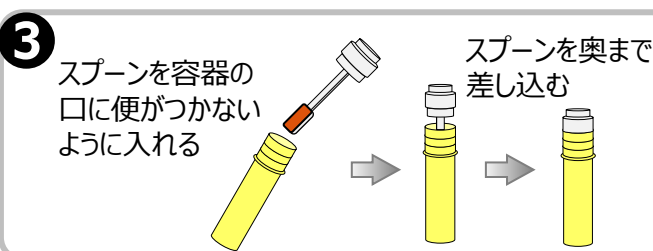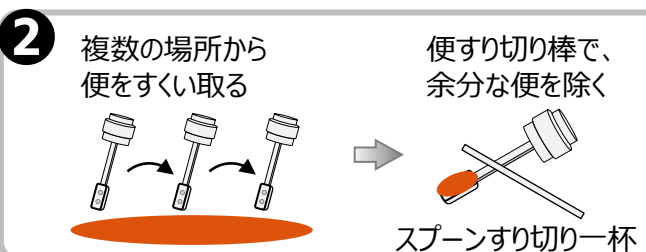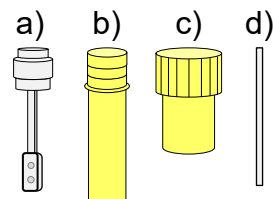

採便シート「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。

ご注意 採便シートを便器に準備する前に、排尿を済ませておいてください。

採便シートはトイレにそのまま流せます。

スプーン部分のみに便がつくように、場所を変えながら複数回すくい取ってください。

便すり切り棒で、すり切り一杯になるようにこそぎ落としてください。

※ 便すり切り棒は水に溶けるのでトイレに流してください

スプーン部分を容器の口につかないように容器の奥まで差し込んでください。

キャップがきちんと閉まると、キャップの中の液体が容器に入ります。液体が入ったことを確認してください。

容器を5~6回振って中身を混ぜます。

採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて、便が液に浸かるように立てて提出日まで室温で保存してください。