

# 取扱説明書


# らくりゅう 楽流カップ WIDE

## STEP 1

### 準備

裏面にある両面テープの剥離紙を剥がしてください。

※剥離紙はトイレに流せません。

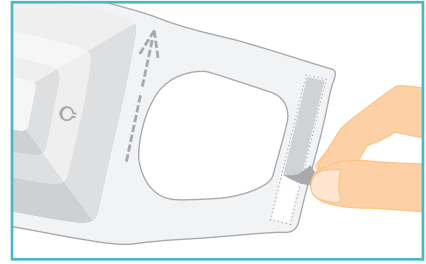

## STEP 2


### 設置

便座または便器の奥側に採便シートを貼りつけます。

※便座カバーを使用されている場合は便器に貼りつけてください。

※設置してから形を整えてください。


#### 設置方向

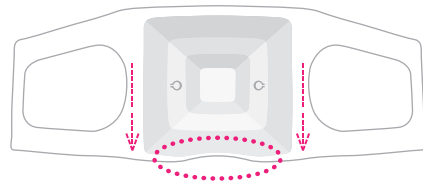

矢印と切欠き側が手前



#### 設置イメージ

便座または便器の  
穴の中心より  
奥側に設置

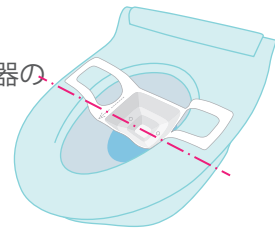

#### 設置高さの目安

貼り付けた位置から溜まり水までの  
距離の中間くらい

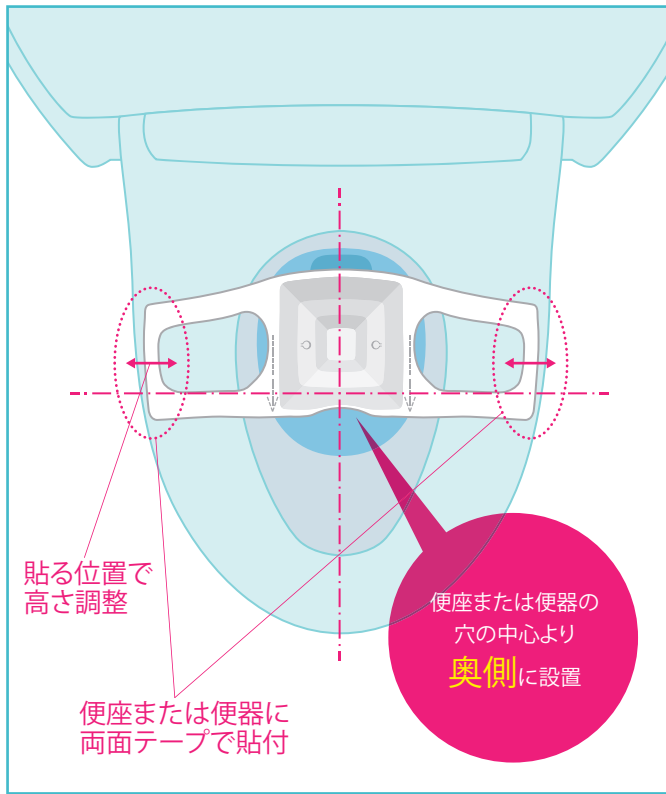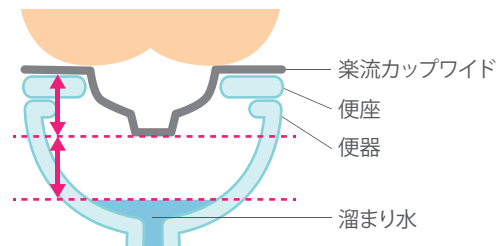

貼る位置で  
高さ調整

便座または便器に  
両面テープで貼付

## STEP 3

### 採便・処分

用便後、便を採取します。その後、両面テープが残らないよう便座または便器からゆっくり剥がし、そのままトイレに流してください。

※採便シートを剥がす際、急に剥がすと採便シートの破れや糊残りの原因になります。

