

腸内フローラ検査用大便採取説明書（ブラシ型）

⚠️ ご注意 ⚠️

- 液体が誤って皮膚に付いたり目や口に入った場合は、水で十分に洗い流してください。瞬時に害を与えるものではありません。刺激が残る場合、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管し、お子様が誤飲されないようにご注意願います。

○ キット内容を確認してください。

- ・採取容器 1本
(液体入り)
- ・採便用シート 1枚
*含まれない事もあります
- ・本説明書 1枚

大便の取り方

ご注意 必ず、排尿を済ませてから次の作業に取り掛かってください。

手順①（採便用シートを使用しない場合、③からお進みください）


1. 採便用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。
2. 採便用シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。

手順②

採便用シート上に排便してください。使用後は、トイレにそのまま流せます。

手順③


1. チューブ内の液がもれないよう採取容器の細い方を下にお持ちください。
2. ピンクの柄の部分の回しながら、上に引き出します。

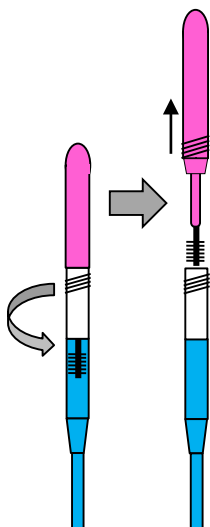

手順④

ブラシ部分にのみ大便がつくよう場所を変えながら数ヶ所に突き刺してください。


※ 余分に大便を取り過ぎると容器からはみ出しますのでご注意ください。

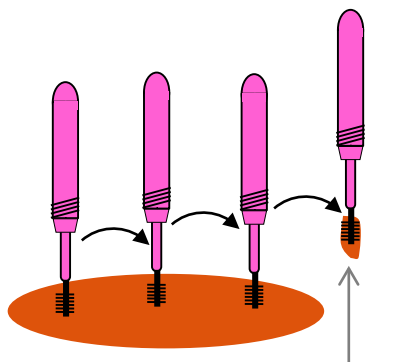

採取量の目安
米粒程度

手順⑤

1. ブラシ部分を元のチューブに戻してください。
2. 回すように締めて、きちんと密閉されたことを確認してください。
3. 容器を5～6回振って中身を混ぜます。

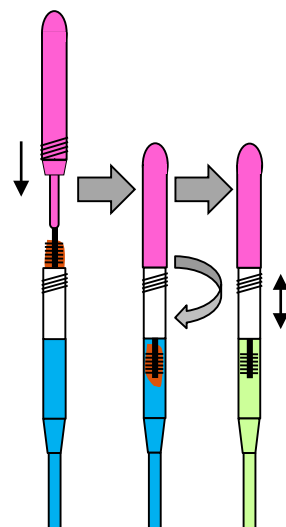

手順⑥

採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて提出日まで室温で保存してください。