

腸内フローラ検査用大便採取説明書（ブラシ型）

☆キット内容を確認してください。

採取容器（液体入リスポイト）	1本
採使用シート	1枚（含まれない場合もあります） （採便後トイレにそのまま流せます）
今お読み頂いている説明書	1枚

便の取り方（採使用シートを使用しない場合、③からお進みください）

☆ご注意！！

必ず、排尿を済ませてから次の作業に取り掛かってください。

- ①－1 採使用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。
－2 採使用シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。

② 採使用シート上に排便してください。

- ③－1 チューブ内の液がもれないよう採取容器の細い方を下にお持ちください。
－2 ピンクの柄の部分回しながら、上に引き出します。

☆ご注意！！

採便管内の液体（グアニジン溶液）は誤って触れた場合、瞬時に害を与えるものではありませんが、速やかに水洗してください。

- ④ **ブラシ部分にのみ便がつく程度に場所を変えながら数ヶ所に突き刺してください。**

☆ご注意！！

（何回か突き刺した便の量は米粒1つ程度で十分です）
（余分に便を取り過ぎて容器周りに付かないようご注意ください）

- ⑤－1 ブラシ部分を元の液チューブに戻してください。
－2 回すように締めて、きちんと密閉されたことを確認してください。
－3 容器を5～6回振って中身を混ぜます。

- ⑥ 採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて提出日まで、室温で保存してください。

