

腸内フローラ検査用大便採取説明書（スプーン型）

⚠️ ご注意 ⚠️

- 液体が誤って皮膚に付いたり目や口に入った場合は、水で十分に洗い流してください。瞬時に害を与えるものではありません。刺激が残る場合、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管し、お子様が誤飲されないようにご注意願います。

○ キット内容を確認してください。

- ・採取容器 1本
(液体入り)
- ・採便用シート 1枚
*含まれない事もあります
- ・本説明書 1枚

大便の取り方

ご注意 必ず、排尿を済ませてから次の作業に取り掛かってください。

手順①（採便用シートを使用しない場合、③からお進みください）


1. 採便用シートは和式・洋式どちらの便器にも使えます。
2. 採便用シートに印刷されている「使用上の注意」をよく読んでから準備してください。

手順②

採便用シート上に排便してください。使用後は、トイレにそのまま流せます。

手順③


1. 容器内の液がもれないよう茶色の蓋側を上にしてお持ちください。
2. 茶色の蓋の部分を中心に回しながら、上に引き出します。
3. 液をこぼさないようにご注意ください。

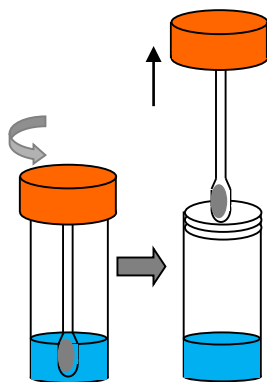

手順④

さじ部分に大便がつくよう場所を変えながら数ヶ所よりすくい取ってください。


※ 余分に大便を取り過ぎると容器からはみ出しますのでご注意ください。

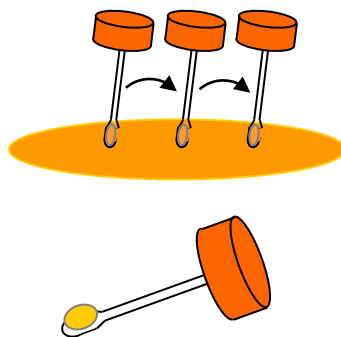

↑ 採取量の目安
小豆粒程度

手順⑤

1. さじ部分を元の容器に戻してください。
2. 茶色の蓋が回らなくなるまで固く締めて、きちんと密閉されたことを確認してください。
3. 容器を5～6回振って中身を混ぜます。

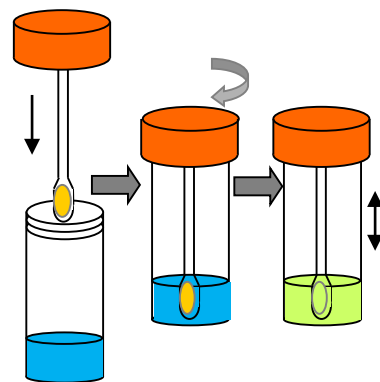

手順⑥

採取した容器を、入っていたビニール袋に入れて提出日まで室温で保存してください。