


-腸内フローラ解析用- 糞便の採取手順 (スプーン型)

腸内フローラ解析用糞便採取キット

キット内容をご確認ください。

- ・採取容器 (液体入り) 1本
- ・採便シート 1枚
(らくとりシート、または楽流カップ)
- ・説明書

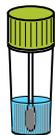

ご注意




- ・採取手順に従いご使用ください。(直接、肛門に指してのご使用はおやめください。)
- ・容器に亀裂や破損がある場合には、ご使用をおやめください。
- ・保存液が誤って皮膚、粘膜や傷口に付いたり、目や口に入った場合には、水で十分に洗い流してください。直ちに害を与えるものではございませんが、刺激が残る場合は必要に応じて、医師の診察を受けてください。
- ・乳幼児やペットの手が届かないところに保管してください。
- ・使用時以外は蓋を開けず、使用後は速やかに蓋をしてください。
- ・蓋の開け閉めの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- ・使用前、後の容器は、横向きや逆さにならないようにし、冷暗所(室温:30℃以下)、または冷蔵庫で保管してください。


1 採便シートを便器に準備する
採便シート上に排便する




2 柄の部分
を回す
上に引き抜く

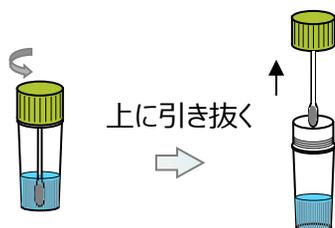


3 複数の場所から
便をすくい取る
↑採取量の目安
小豆粒程度

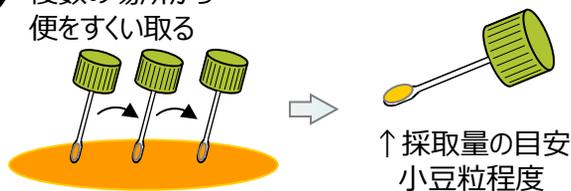

4 青色の蓋を
チューブに戻す
固く締める
5~6回
振る

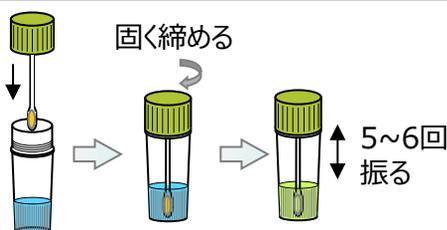

5 提出まで、入っていたビニール袋に入れ、立てた状態で、冷暗所、または冷蔵保管

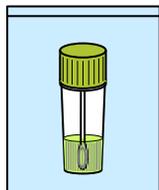

採便シート「使用上の注意」をよく読んでから、ご準備ください。

ご注意 採便シートを便器に準備する前に、必ず排尿を済ませておいてください。

採便シートを使用しない場合、②からお進みください。

容器内の液がもれないよう緑色の蓋側を上にしてお持ちください。

※ 蓋以外のスプーンや柄の部分を素手で触らないでください。

スプーン部分のみに便がつくように、場所を変えながら複数回すくい取ってください。

※ 余分に便を取り過ぎると容器からはみ出しますのでご注意ください。

緑色の蓋が回らなくなるまで固く締めて、きちんと密閉されたことをご確認ください。

※ 液が漏れないようにしっかりと蓋を締めてください。

容器を5~6回振って中身を混ぜます。

採便容器は、入っていたビニール袋に入れ、横向きや逆さにならないように、冷暗所(室温:30℃以下)、または冷蔵庫で保管してください。